

Einbauanleitung

- **ADESSOSPLIT**[®] Plattenset Candulor[®]
- **Splitex**[®] Plattenset Candulor[®]





Candolor® Artikulator mit der Bauhöhe 116 mm, inkl. Erhöhungsset Art.-Nr.: 10026.



Die Abdeckplatte des Candolor® Artikulators mit einem Heißluftföhn erwärmen (unter 80°C) und vorsichtig ablösen, ggf. ein spitzes Messer zur Hilfe nehmen.



Befestigungsschrauben der Abdeckplatte lösen und den oberen Teil des Artikulators abheben.
Achtung: Befestigungsschrauben nicht wiederverwenden!



Den Frontzahnführungsstift des Candolor® Artikulators durch den roten Frontzahnführungsstift aus dem Erhöhungsset ersetzen.



Den roten Block aus dem Erhöhungsset im Artikulator – mit der Schrift nach oben – platzieren.



Das Oberteil des Candolor® Artikulators wieder aufsetzen und mit den beige-fügten Schrauben aus dem Erhöhungsset befestigen.



Die Candolor® Abdeckplatte erneut erwärmen und unter Druck auf der vorherigen Position fixieren.



Der Artikulator ist bereit für die Gleichschaltung.




Den Artikulator auf dem Kopf stehend öffnen und Metallkleber in die dafür vorgesehenen Aussparungen der Sockelplatte geben.



Die Sockelplatte in das Artikulator-oberteil einsetzen. Der Magnet im Artikulator fixiert die Sockelplatte und der Kleber sorgt für dauerhaften Halt.



Den Zentrierschlüssel zusammen mit der Justiersockelplatte in den Artikulator setzen und Metallkleber mittig auf der Justiersockelplatte auftragen.

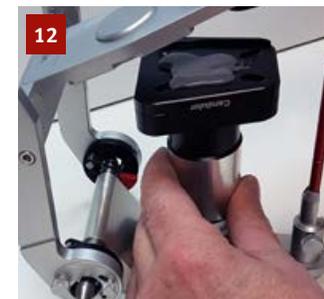

Den Artikulator auf dem Kopf stehend schließen.



Den Artikulator mit einem Gummiband fixieren und den Kleber für ca. 90 Min. aushärten lassen.



Einsatzbereiter Candolor® Artikulator mit einem Artex®-Baumaß von 126 mm.

Rechtliche Hinweise

Alle Angaben dieser Dokumentation wurden mit größter Sorgfalt erarbeitet, Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Keine juristische Verantwortung auf Folgen von fehlerhaften Angaben oder unsachgemäßem Gebrauch.

Candolor® ist eine eingetragene Marke der CANDULOR AG, 8152 Glattpark, CH
Splitex® und Artex® sind eingetragene Marken der Amann Gurrbach GmbH, 75177 Pforzheim, DE
Adesso Split® ist eine eingetragene Marke von K. Baumann, 75210 Keltern, DE