


istruzioni per l'uso – originale




Controllare l'impronta e riempire le parti mancanti con cera o silicone. Rimuovere il materiale in eccesso (solco vestibolare, palato ecc.), per ottenere un'arcata dentale stabile e bassa.




Porre la piastra di posizionamento sull'impronta in posizione parallela.

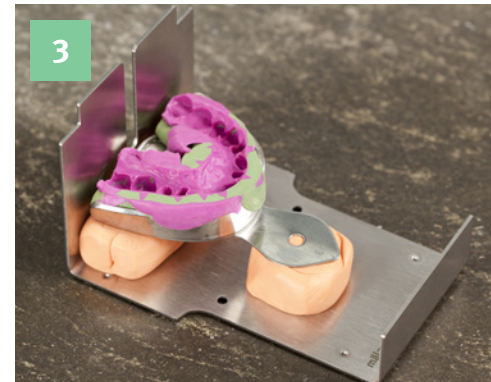

Fissare l'impronta sul portaimpronta con la plastilina.

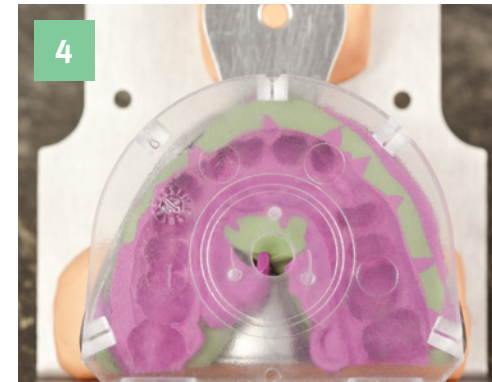

Per posizionare l'impronta utilizzare una piastra di posizionamento grande o piccola, per calcolare le dimensioni necessarie della piastra zoccolo e l'andamento della futura arcata dentale di gesso.

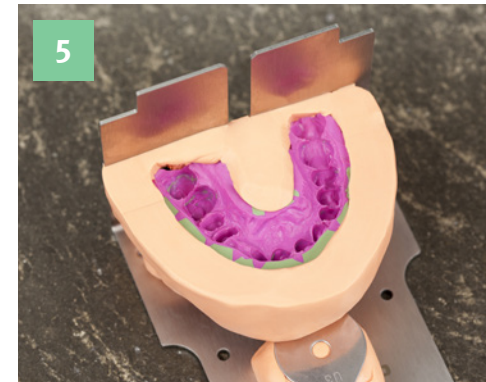

Riempire le parti mancanti con la plastilina, per evitare la fuoriuscita di gesso durante la colata.



Fissare la piastra zoccolo sul disco portapiastre del foraggi. I prismi della piastra zoccolo devono aderire perfettamente al fondo del disco portapiastre ed essere fissati con viti.



Piastra zoccolo fissata.



Porre il portaimpronta sul disco portapiastre.



Porre il portaimpronta compreso il disco portapiastre sulla piastra magnetica del foratore.



Rilevare la posizione di foratura desiderata con l'aiuto del punto laser.




Per iniziare la foratura premere il tasto sul lato. Attenzione: Il portapiastre viene fermato automaticamente con fissaggio elettromagnetico durante l'operazione di foratura - non tenere fermo.



Piastra zoccolo a foratura ultimata.



Inserire i perni sulla piastra zoccolo (non premere i perni troppo a fondo, in modo da poter staccare successivamente il segmento senza problemi).

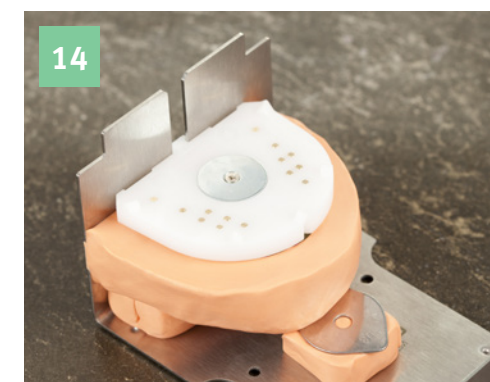

Dopo aver inserito i perni, eseguire un controllo ponendo la piastra zoccolo sull'impronta.



Riempire l'impronta con il gesso. Per migliorare l'afflusso, se necessario aumentare la vibrazione.



Per evitare bolle d'aria quando si immerge la piastra zoccolo, riempire l'impronta fino a poco oltre il margine.



Porre la piastra zoccolo a faccia in giù sul supporto e immergerla.



Dopo aver tirato leggermente rimuovere delicatamente il gesso in eccesso lungo la piastra zoccolo.



Dopo circa 25 minuti rimuovere delicatamente l'impronta, insieme alla piastra zoccolo, attraverso la fessura sul supporto.



L'arcata dentale si distacca dalla piastra zoccolo dando dei leggeri colpetti. Attenzione: Rispettare il tempo di presa del gesso indicato dal produttore!




In alternativa alla squadrage modelli l'arcata dentale può essere lavorata a mano libera (con l'aiuto dei cilindri abrasivi Art. : 15100-120).



Per un migliore orientamento segnare prima le parti da segare. In caso di segmenti più grandi praticare incisioni aggiuntive di alleggerimento (si veda lo schizzo, punto 28).



Segare l'arcata dentale con una mola diamantata.

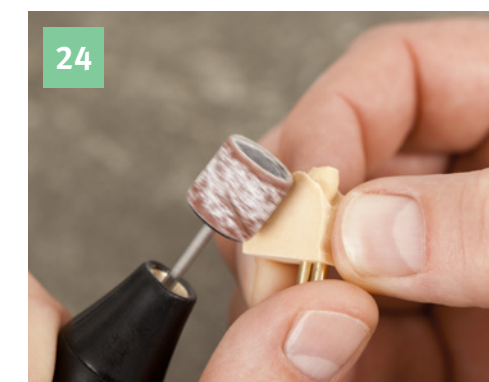

Lavorare i singoli segmenti con i cilindri abrasivi o con una fresa e rimuovere la polvere di gesso.




Modello DIVARIO® pronto con posizione corretta sulla piastra zoccolo.



Sistemare la contropiastra DIVARIO® prima dell'articolazione per garantire una corrispondenza esatta. La contropiastra funge da placchetta di rimozione ed è riutilizzabile.



Lavoro finito nell'articolatore.

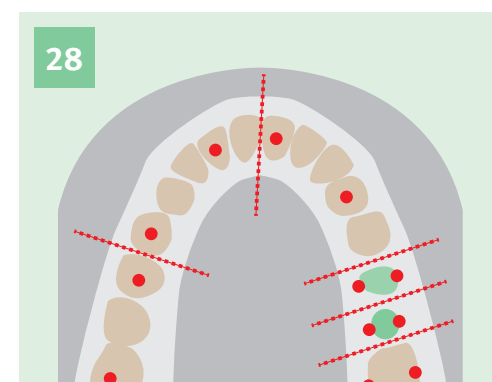

In caso di segmenti più grandi praticare incisioni aggiuntive di alleggerimento (si veda lo schizzo). I punti rossi sullo schizzo rappresentano i perni.